

# 折り畳み搬送電動ストレッチャー ～【Eストコン】AD-010115E～

## 取扱説明書



(担架固定式)

### <もくじ>






- P1 ～ご使用前に～
- P2 ～点検・お手入れ・保管～
- P3 ～素材と仕様～
- P4 ～組み立て方①～
- P5 ～組み立て方②～
- P6 ～安全ベルトの取付方～
- P7 ～畳方・外し方①～

# ご使用前に

安全にご使用いただく為に、この説明書をよくお読み頂き、正しくご使用ください。

この後、必要な時にすぐお読みいただける様に、大切に保管してください。

本文中の図記号表示の意味、内容は以下の通りです。




	警告・・・ 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
	注意・・・ 人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容
図記号の意味	
	「警告」や「注意」を要す事項を表します。
	「禁止」を表します。
	「必ずして守ってほしい行為」を表します。

## 【警告】

- 移動時には必ず安全ベルト(2ヶ所)をして下さい。
- 耐荷重120kgを超える方は使用しないでください。
- フレーム等に巻き込まれない服装で使用しないでください。
- 使用している間、介護者は介護される方から目を離さないでください。
- 人を乗せて手押し移動のストレッチャー以外には使用しないでください。
- 本機を組み立ての際、必ず金具が固定されていることをご確認後、ご使用して下さい。
- 壊れた状態、不具合を感じた時は、速やかに使用をおやめいただき、すぐに販売店にご連絡下さい。
- 改造はしないでください。
- 本機へ介護者を乗せ降ろしの場合は必ずキャスターのロックをして固定して下さい。
- ストレッチャーに人を乗せる場合は、マットレス前後中央から等分に体重が分散するように乗せて下さい。  
片側に体重がかかるような乗せ方で移動するとバランスを崩し転倒・転落の原因となります。

## 【注意】

- 階段・段差・溝・長い昇り降り坂での使用は危険です。
- シャワーストレッチャーではありません。湯水などを掛けしないでください。
- エレベーターを使用する際、ドアの隙間に車輪が落としこまないか確認して下さい。

-  ベッドなどから移乗またはベッドへの移乗は、必ず2名以上で行って下さい。
-  アクチュエーターの電池残量は使用前に必ず確認して下さい。
-  降ろするときは人の手や物が挟まっていないか確認の上必ず降ろして下さい。

# 点検・お手入れ・保管



## <使用前の点検>

- 1: 担架固定用ネジに異常はないか確認
- 2: キャスターに異常がないか確認
- 3: キャスターのロックがスムーズに行えるか確認



異常が見られた場合は、使用を中止し、すぐに販売店までご連絡をお願い致します。

## <お手入れ>

マットレス・枕は水またはお湯で、汚れがひどい場合は中性洗剤をご使用ください。

洗浄後は十分に乾燥させてからご使用下さい。

※注意: シンナー・ベンジン・アルコール類は使用しないでください。



点検・整備・清掃をして下さい。

ボルト・ナットの緩み・フレームのゆがみ・ガタつきなどの点検を緩みがあれば締めて下さい。

泥やほこりなどは、ぬれた布でふき取って下さい。あと乾いた布でふき、可動部分に潤滑油として

いただければ長くご使用いただけます。潤滑油(5-56)等を赤丸印に



(説明のため担架外しています)



## <保管>

保管場所は室内で高温多湿でない直射日光が当たらない場所で保管をお願い致します。

折り畳んで立てて保管する場合は、倒れないように保管して下さい。

※倒れてケガ、損傷する場合があります。

●保証書……保証期間は1年間です。大切に保管をお願い致します。(別紙)

●アフターサービス……万が一故障・不具合などがございましたら、お買い上げいただいた販売店まで恐れ入りますがご連絡ください。

●アクチュエーターの取扱説明書は別紙参照


# 各部の名称と材質・仕様

## <担架の各部の名称>



- ◇枕
- ◇サイドレール(2本)
- ◇マット
- ◇安全ベルト
- ◇ボンベ架台
- ◇小物入れ

## <トランスポーターの各部の名称>

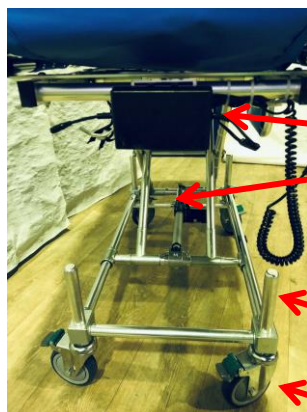

- ◇バッテリー
- ◇アクチュエーター
- ◇揺れ防止パイプ(4本)  
(旧タイプ画像使用)
- ◇ロック付キャスター(4個)

◇ボンベ架台

足側

## <各部の材質・仕様>

品番	AD-010115E
材質	フレーム部／アルミニウム合金
	マット・枕／ポリエステル
	クッション／ウレタン
	安全ベルト／PP・ポリエステル
	キャスター／PP・PU系樹脂 (125mmφ)
重量	約30kg
サイズ	最大: 1830mmX550mmX800mm(マットレス使用時)
	最少: 1830mmX550mmX460mm(マットレス・揺れ防止使用時)
	最少: 1830mmX550mmX340mm(揺れ防止無しマットレス使用時)
	折り畳時: 1010mmX550mmX480mm
耐荷重	約120kg


# 組み立て方①

## <キャスター>

①梱包時はキャスターは取付ています。




②キャスターは4ヶ所の穴にキャスターを締めていきます。

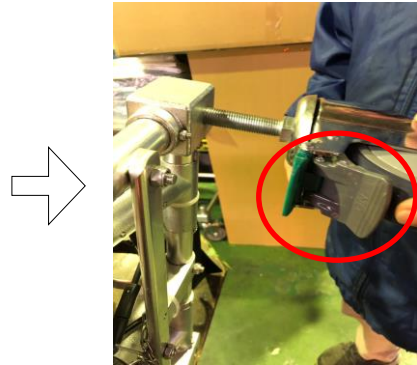


\* キャスターはロック状態にしてください。

③キャスターのネジが出てきたら揺れ防止パイプで締めてください。

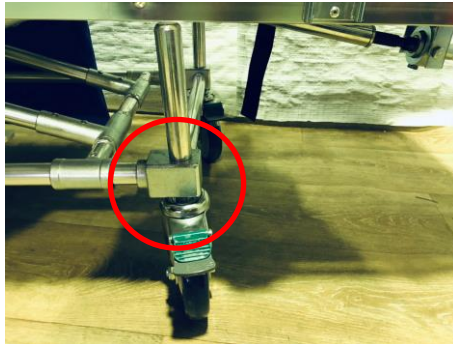

(写真のキャスターはまだ締めていません)

(パイプ15cm使用)

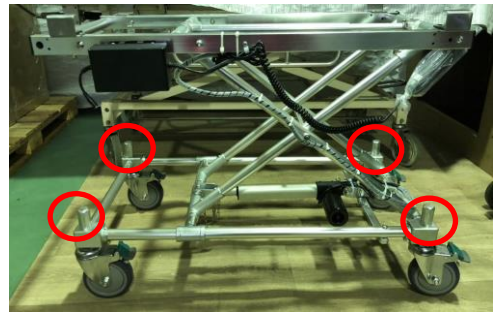

(パイプ10cm使用)

## <点滴棒> 必要に応じて



点滴棒はトランスポート下段あります。




架台をセット



架台に差し込んで適度な高さに合わせる。

## 組み立て方②

### ④ 背上げレバー...5段階

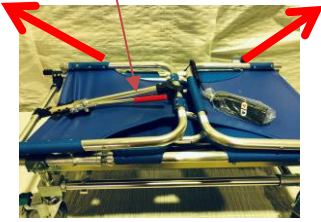

頭側と足側を広げます

### ⑤ サイドレールを起こす



### ポンプ架台の取付(必要に応じて)





ネジで取付ます

必要に応じて点滴簿・酸素ポンプ架台をセット。それぞれネジで固定。  
(酸素ポンプ架台の説明は次のページ参照)

マットレスと枕をセットします。

### ⑥ 充電されたバッテリーを取り付けます

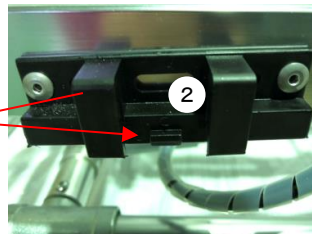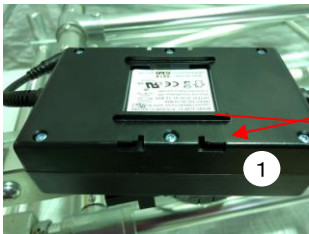

バッテリーの穴に①爪(取付側)に差し込みストレッチャー側に押しながら②四角い爪にのせる

### ⑧ 高さ調整はリモコンです。(無段階) 揺れ防止パイプ150mm使用中下げる時は揺れ防止に当たったら必ず止める 故障の原因になります。



下段490mm(但し揺れ防止パイプ150mmついた状態) 上段800mmマットレスまで

# ★安全ベルトの取付方

(旧型ベルト使用)



- ① ストレチャーのパイプの裏側にベルト通す。(1本目)



- ② 片方の輪にもう片方(金具等側)をくぐらせる。



- ③ 最後まで金具側を引っ張りパイプに固定する。




- ④ 2本目は反対側のパイプに①から③の手順で同じように取付る。
- ⑤ セットするときは金具を赤い側の穴に差し込む。締め具合の調整は金具側のベルトで調整する。はずす時は赤いところを押すとはずれます。

# 畳み方・外し方①

<サイドレールたたみ方>

①サイドレールのたたみ方

サイドレールを矢印←の方向へ引きます。

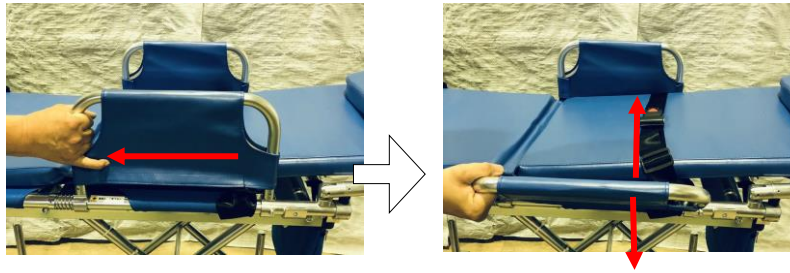

サイドレールは内側にも外側にも倒せます。

②点滴棒はずします。

③背上げ・足側(担架)をそれぞれ中央に畳みます。




④酸素ボンベ架台の外し方




ネジをはずします。(2ヶ所)

酸素ボンベ留めるマジックテープ(2本)


⑤バッテリーの外し方

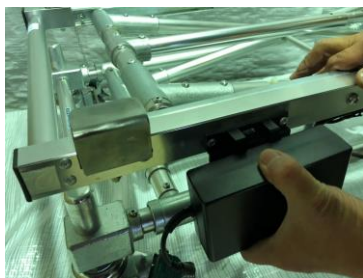

手前に引き下へ下げて爪からはずします。

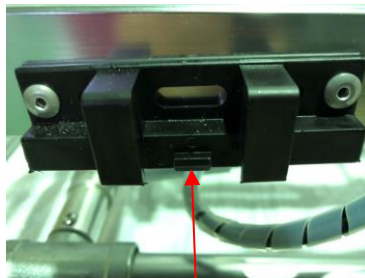

爪

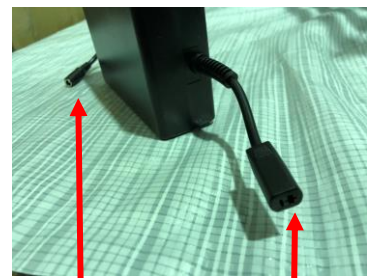

充電器接続口

リモコン接続口

**\*電池が空になると充電に約5時間～8時間かかるので60%70%使用したら充電お願いいたします。**

**バッテリーの消耗も変わります。**



## \*こんな時

* ストレッチャーが昇降しない	充電できていますか？ バッテリー等の接続部分キッチリ入ってますか？
* リモコンを押しても動かない	充電できていますか？ バッテリー等の接続部分キッチリ入ってますか？
* 充電ができない	下記までお問い合わせください。

よくある動かない原因は接続部分がキッチリと最後まで入っていないことが多いです。  
今一度確認をお願いいたします。

\* 解決しない場合は販売店までご連絡ください。

<p>&lt;製造元&gt; 合同会社 介護タクシー・アド 救急搬送器具・福祉関連機器担当 〒581-0052 大阪府八尾市竹濑1-222-5 TEL06-6773-9945 FAX06-6773-9944 受付時間9:00~17:00</p> <p>&lt;販売代理店&gt; 株式会社ディズム 【ディーケアジャパン】 〒630-0134 奈良県生駒市あすか野北1-1-3 TEL0743-71-1844 FAX0743-71-1884 受付時間9:00~18:00</p>
--